

eyedia™ multi-purpose solution

Опис

Цей багатоцільовий розчин **STERILE A**, ізотонічний, з буферним водним розчином у складі, містить sorbitol, tris(hydroxymethyl)aminomethane, tyloxapol, ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate, в 0.00011% розчині polyhexamethylene biguanide.

Призначення

Багатоцільовий розчин призначено для використання з усіма м'якими контактними лінзами, включаючи силікон-гідрогелеві, які може Вам порекомендувати лікар.

Застереження з використання

Не використовуйте продукт, якщо маєте алергію на будь-який з компонентів.

Інструкція з використання

1. При першому відкритті пляшки, відкручуйте кришечку доти, доки не розірвете захисне кільце. Конус всередині кришечки проткне захисну мембрану пляшки.

Зауваження: конус також допомагає щільно закрити пляшечку.

Тертя та полоскання

- Крапніть по 3 краплі багатоцільового розчину на кожен з поверхонь лінзи та потріть обережно протягом 10 секунд.
- Ретельно промийте багатоцільовим розчином кожен з поверхонь лінзи протягом 5 секунд.

Замочування та зберігання

- Помістіть очищені контактні лінзи в контейнер для зберігання, заповнений свіжою порцією багатоцільового розчину. Завжди використовуйте свіжий розчин.
- Залиште лінзи в розчині щонайменше на 6 годин перш, ніж їх одягнути.

Полоскання

- Перш, ніж одягти, прополощіть лінзу багатоцільовим розчином з кожного боку протягом 5 секунд.
- Виливайте розчин з контейнера для зберігання контактних лінз після кожного використання.

Загальні інструкції

- Завжди мийте та витирайте насухо руки перед тим, як використовувати лінзи.
- Використовуйте лише ті розчини, які Вам порекомендував лікар. Завжди консультируйтесь зі своїм лікарем-офтальмологом, якщо хочете змінити щось у своєму догляді за контактними лінзами, аби забезпечити сумісність продуктів.

Попередження

- Проблеми під час використання контактних лінз та засобів по догляді за контактними лінзами можуть спричинити в подальшому серйозні пошкодження Ваших очей. Тому дуже важливо дотримуватись порад Вашого лікаря, а також – інструкцій з використання, зазначених на контактних лінзах, засобах по догляді за контактними лінзами та контейнерах для зберігання.


Негативні реакції

- У випадку виникнення дискомфорту, підвищеної слізливості, погіршення зору або почервоніння очей, негайно зніміть контактні лінзи та зверніться до свого лікаря-офтальмолога. Людям, що носять контактні лінзи рекомендовано проходити планове обстеження у лікаря-офтальмолога двічі на рік або частіше, якщо є така необхідність.

Важлива інформація з безпеки

- Завжди слідуйте рекомендаціям з використання продукту – недотримання може призвести до втрати зору.
- Задля уникнення забруднення багатофункціонального розчину, не допускайте контакту кінчика горлечка пляшки з будь-якою поверхнею.
- Задля уникнення забруднення багатофункціонального розчину, ні в якому разі не переливайте, не змішуйте чи не розбавляйте розчин в інших пляшках або контейнерах.
- Не застосовуйте при тепловій (термічній) дезінфекції

Застереження


- Тримайте пляшечку щільно закритою між застосуваннями
- Виливайте залишки розчину, якщо з моменту відкриття пляшечки пройшло 90 днів.
- Зберігайте розчин при кімнатній температурі 25°C
- Не використовуйте розчин після закінчення строку придатності, зазначеного на упаковці 
- Перед першим використанням переконайтесь, що захисну мембрану не пошкоджено.
- Зберігайте продукт в недоступному для дітей місці.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

Догляд за лінзами та контейнером





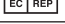




- Сольовий розчин та зволожуючі краплі не підходять для дезінфекції лінз.
- Перед тим, як помістити контактні лінзи в контейнер для зберігання, щоразу заливайте свіжий розчин; ніколи не використовуйте повторно стару порцію розчину або не доливайте до неї
- Не допускайте потрапляння на лінзи, зберігання лінз, а також промивання контейнера будь-якою водою, як то: з водопроводу, бутильованою чи дистильованою, або ж будь-яким іншим нестерильним розчином.
- Щоразу після використання контейнера очищуйте його, промивайте та висушуйте. Ви можете перевернути контейнер під час сушіння для швидшого стікання розчину.
- Уникайте потрапляння на контактні лінзи чи контейнер води з водопроводу, бутильованої води та слини.
- Завжди виливайте залишки розчину з контейнеру після завершення дезінфекції лінз.

Пакування

Цей багатоцільовий розчин постачається у  пляшках, об'ємом 100 мл, 120 мл, 230 мл та 360 мл. На пляшках та упаковках зазначається лот і дата закінчення строку придатності.

Розшифровка символів

На упаковці або на пляшці з розчином можуть бути зазначені наступні символи:

| Символ | Значення |
|---|---|
|  | Стерильно (використовуються методи асептичної обробки) |
|  | Див. інформацію про продукт |
|  | Виробник |
|  | Європейський знак відповідності |
|  | Уповноважений представник в Європейському Союзі |
|  | Використати до дати (дата закінчення строку використання) |
|  | Код партії |
|  | Дата виробництва |
|  | Знак відповідності в Україні |





Clearlab SG Pte. Ltd.
 139 Joo Seng Road, Singapore 368362
 www.clearlab.com

Уповноважений представник в Україні:
 ТОВ «Гранд Рітейл Кампані», Україна, м. Київ 01010, вул. Івана Мазепи, 10
 Тел. + 380 67 384 74 54, grand-retail@ukr.net


 UA.TR.067